



OPHPET HYDRA RESTORE

Spray

SPRAY OCULARE

A BASE DI ACIDO IALURONICO - SENZA CONSERVANTI

CARATTERISTICHE GENERALI

Ophpet Hydra Restore Spray è una soluzione sterile, isotonica e priva di conservanti, indicata per il trattamento della zona oculare di cani e gatti.

Composto da elementi naturalmente presenti nei tessuti oculari e nella pellicola lacrimale, come polimeri idrofili e umidificatori, e combinato con componenti ad azione specifica come l'estratto di Centella asiatica, tradizionalmente usato in caso di traumi oculari, facilitano una più rapida ri-epitelizzazione dei tessuti.

INDICAZIONI

Ophpet Hydra Restore Spray va usato ad occhio aperto e può essere utilizzato per trattare disturbi oculari di minore entità. Applicata nell'occhio, la soluzione è in grado di alleviare, per esempio, i sintomi associati a sindrome da occhio secco, piccole lesioni oculari o il discomfort percepito a seguito di intervento chirurgico.

MODALITÀ D'USO

Al primo utilizzo, prima di somministrare **Ophpet Hydra Restore Spray** occorre erogare 4 spruzzi all'aria per innescare l'erogatore ovvero fino a quando lo spray nebulizzato diventi visibile.

- Aprire le palpebre dell'animale o assicurarsi che l'animale abbia l'occhio aperto al momento dell'erogazione.
- Nebulizzare la soluzione negli occhi dell'animale mantenendo l'erogatore **a non meno di dieci centimetri dall'occhio** così che l'erogazione sia ben diffusa, efficace e gradevole per l'animale.
- Assicurarsi che l'erogatore spray non tocchi l'occhio per evitare contaminazioni.

- In presenza di secchezza e piccole lesioni oculari erogare una quantità di soluzione sufficiente ad umettare l'occhio. Il prodotto favorisce l'idratazione oculare alleviando sensazioni di fastidio e discomfort, oltre a coadiuvare il processo di ri-epitelizzazione.

CONFEZIONE

Ophpet Hydra Restore Spray è confezionato in flacone sterile, contenente 10 ml di soluzione. Lo spray è confezionato in un astuccio completo di foglietto illustrativo. Una volta aperto, il prodotto può essere utilizzato fino a un massimo di 3 mesi.

AVVERTENZE

Pur trattandosi di una soluzione protettiva e coadiuvante la ri-epitelizzazione, questa non ha proprietà curative. Non deve essere utilizzata per disinfettare l'occhio o per trattare affezioni o patologie quali congiuntivite, cataratta e gravi infezioni oculari. In tali casi, è necessario consultare un veterinario.

Il prodotto è vendibile senza obbligo di prescrizione medica.

Deve essere conservato ad una temperatura compresa tra 2°C e 30°C.

A confezionamento integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA

COMPONENTI

Sodio ialuronato HMW	D-Mannitolo
Sodio ialuronato LMW	Fosfato di sodio monobasico monoidrato
Estratto secco idroalcolico di Centella asiatica	Fosfato di sodio dibasico dodecaidrato
L-glicina	Cloruro di sodio
Kollidon 30 (PVP)	Acqua per preparazioni iniettabili
Vitamina E-TPGS	

C.O.C. Farmaceutici srl

Sede legale e stabilimento produttivo
Via Modena, 15
40019 - S. Agata Bolognese (BO) ITALIA
Tel. +39 (0)51 6829811

Sede Commerciale, uffici amministrativi e stabilimento produttivo
Via Chiesa Sud, 156 C/D/E/F/G
41016 - Rovereto s/S - Novi di Modena (MO) ITALIA
Tel. +39 (0)59 673911