

# OPHPET HYDRA Spray

# SPRAY OCULARE A BASE DI ACIDO IALURONICO - SENZA CONSERVANTI

# **CARATTERISTICHE GENERALI**

**Ophpet Hydra Spray** è una soluzione sterile, isotonica e priva di conservanti, indicata per il trattamento della zona oculare di cani e gatti.

Contiene acido ialuronico reticolato che, grazie alla sua elevata capacità di legare le molecole d'acqua, favorisce l'idratazione oculare, riequilibrando le normali condizioni fisiologiche dell'occhio.

### INDICAZIONI

**Ophpet Hydra Spray** va usato ad occhio aperto e può essere utilizzato per trattare disturbi oculari di minore entità. Applicata nell'occhio, la soluzione è in grado di alleviare, per esempio, l' affaticamento e la secchezza oculare dovuti a fattori ambientali.

# **MODALITÀ D'USO**

Al primo utilizzo, prima di somministrare Ophpet Hydra Spray occorre erogare 4 spruzzi all'aria per innescare l'erogatore ovvero fino a quando lo spray nebulizzato diventi visibile.

- Aprire le palpebre dell'animale o assicurarsi che l'animale abbia l'occhio aperto al momento dell'erogazione.
- Nebulizzare la soluzione negli occhi dell'animale mantenendo l'erogatore a non meno di dieci centimetri dall'occhio così che l'erogazione sia ben diffusa, efficace e gradevole per l'animale.
- Assicurarsi che l'erogatore spray non tocchi l'occhio per evitare contaminazioni.
- In presenza di affaticamento oculare erogare una quantità di soluzione sufficiente ad umettare l'occhio. Il prodotto favorisce l'idratazione oculare alleviando sensazioni di fastidio e secchezza.

# CONFEZIONE

**Ophpet Hydra Spray** è confezionato in flacone sterile, contenente 10 ml di soluzione. Lo spray è confezionato in un astuccio completo di foglietto illustrativo. Una volta aperto, il prodotto può essere utilizzato fino a un massimo di 3 mesi.

### **AVVERTENZE**

Pur trattandosi di una soluzione idratante e riequilibrante, questa non ha proprietà curative. Non deve essere utilizzata per disinfettare l'occhio o per trattare affezioni o patologie quali congiuntivite, cataratta e gravi infezioni oculari. In tali casi, è necessario consultare un veterinario.

Il prodotto è vendibile senza obbligo di prescrizione medica.

Deve essere conservato ad una temperatura compresa tra 2°C e 30°C.

A confezionamento integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

# **COMPOSIZIONE QUALITATIVA**

COMPONENTI
Sodio ialuronato reticolato
Fosfato di sodio dibasico dodecaidrato
Fosfato di sodio monobasico monoidrato
Cloruro di sodio
Acqua per preparazioni iniettabili