

CROSSVISION FORTE

"CROSSVISION FORTE" è una soluzione sterile per uso oftalmico a pH fisiologico a base di acido ialuronico reticolato con urea, secondo una tecnologia brevettata, così da aumentare e migliorare le naturali proprietà meccaniche dell'acido ialuronico, rendendolo in grado di resistere più a lungo alla degradazione da parte dell'enzima ialuronidasi rispetto all'acido ialuronico naturale.

La struttura reticolata che l'acido ialuronico forma offre idratazione ed è in grado di trattenere a lungo le molecole di acqua in modo da migliorare le intrinseche proprietà lubrificanti dell'acido ialuronico mentre, aumentando al contempo la sua azione idratante è indicato come adiuvante nella sindrome dell'occhio secco.

L'acido ialuronico reticolato conferisce al prodotto proprietà lubrificanti, idratanti e riparatrici; è inoltre in grado di alleviare la secchezza oculare dovuta alla sindrome dell'occhio secco e donare sollievo in caso di stanchezza o irritazione oculare determinata da processi infiammatori o condizioni ambientali.

Questa formula è stata sviluppata per donare il massimo comfort già dai primi istanti dopo l'applicazione. È indicata per un utilizzo quotidiano sia diurno che notturno.

Non contiene conservanti e/o molecole ad azione anti-infiammatoria o vaso-costrittrice.

"CROSSVISION FORTE" è compatibile con lenti a contatto.

INDICAZIONI D'USO

"CROSSVISION FORTE" è indicato:

- Per ristabilire e migliorare la stabilità del film lacrimale in caso di sindrome dell'occhio secco;
- In seguito a chirurgia refrattiva;
- Per alleviare gli occhi in caso di arrossamento, fatica e discomfort oculare o della mucosa oculare dovuti a:
 - Fattori ambientali (aria condizionata, eccessiva esposizione alla luce del sole, vento, fumo, inquinamento, acqua di mare o di piscina e salsedine);
 - secchezza oculare in seguito ad eccessivo affaticamento dovuto a: studio, lavoro al computer per lunghi periodi;
 - anormale lacrimazione in seguito ad infiammazione e blefariti croniche;
 - anormale lacrimazione in seguito a chirurgia oculare di varia natura o chirurgia estetica palpebrale;
 - utilizzo di lenti a contatto morbide o semi-rigide.

COMPOSIZIONE

Sodio ialuronato reticolato in soluzione acquosa (di cui sodio ialuronato reticolato 0.4%), Trometamolo, Acido Cloridrico 2N, Sodio Cloruro, Acqua per preparazioni iniettabili. Non contiene conservanti.

ISTRUZIONI D'USO

- Lavare accuratamente le mani;
- Aprire la busta di alluminio;
- Staccare un monodose dallo strip;
- Ruotare e rimuovere il tappo per rompere il sigillo;
- Riporre il tappo assicurandosi di metterlo su una superficie pulita;
- Instillare 2 gocce per ogni occhio premendo leggermente il monodose, se non diversamente prescritto;
- Dopo l'utilizzo richiudere immediatamente il monodose: il contenuto può essere riutilizzato entro 12 ore dalla prima apertura.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto è solo per uso oftalmico;
- Il prodotto è monopaziente;
- Non utilizzare il prodotto se la busta di alluminio o il confezionamento risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso;
- Non utilizzare il prodotto se ci sono particelle visibili e/o cambiamenti nel colore della soluzione;
- Durante l'applicazione, non toccare l'occhio e nessun'altra superficie con la punta del monodose;
- Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza riportata sulla confezione e sul monodose;
- In caso di effetti indesiderati, interrompere il trattamento e consultare un medico;
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione;
- Non sono riportate interazioni con farmaci o altre gocce oculari; in ogni caso, lasciare trascorrere almeno 15 minuti prima di somministrare qualsiasi altra goccia oculare;
- Smaltire il prodotto in base alle normative locali sulla gestione dei rifiuti;
- Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini;
- Consultare il medico prima dell'utilizzo in casi di gravidanza o allattamento;
- Per uso esterno, non ingerire;
- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'Autorità Competente dello Stato membro in cui si è stabiliti.

EFFETTI INDESIDERATI

Dopo la somministrazione, a causa della viscosità della soluzione, può verificarsi una visione leggermente offuscata che scompare rapidamente. Si consiglia quindi di attendere qualche secondo prima di effettuare qualsiasi attività che richieda una visione chiara.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare fra 2°C e 30°C in luogo asciutto lontano da fonti di calore e dall'esposizione diretta alla luce solare.

Il contenuto del monodose può essere utilizzato entro 12 ore dalla prima apertura.

Conservare gli altri flaconcini monodose nella confezione originale in alluminio fino al momento dell'uso.

CONFEZIONAMENTO

Da 5 a 30 monodose richiudibili da 0.5 ml.

VALIDITÀ

A confezione chiusa, non superare la data di scadenza riportata sulla confezione e sul monodose.



DT/01/DT/010



C.O.C. Farmaceutici S.r.l.

Via Modena, 15 - 40019

Sant'Agata Bolognese (BO) Italia

Ultima Revisione: 02.01 del 10/2022



C.O.C. Farmaceutici srl

Via Modena, 15
40019 - S. Agata Bolognese (BO) ITALIA
Via Chiesa Sud, 156 C/D/E/F/G
41016 - Rovereto s/S - Novi di Modena (MO) ITALIA

Cap. Soc. € 1.200.000 I.V.
C.F. e Iscr. Reg.
Impr. di Bologna 03541870378
P.IVA IT 01603491208
R.E.A. Bologna N. 299432



Tubilux Pharma S.p.A.

Via Costarica, 20/22
00071 Pomezia (Roma)
ITALIA

cap. soc. € 472.500,00 I.V.
C.F. / P.IVA 05406661008
R.E.A. Roma N. 883476