

CROSSVISION PLUS

"CROSSVISION PLUS" è una soluzione sterile per uso oftalmico, a pH fisiologico, a base di acido ialuronico reticolato ed acque distillate di camomilla e malva.

L'acido ialuronico reticolato, ottenuto con tecnologia brevettata, conserva tutte le proprietà dell'acido ialuronico lineare con caratteristiche strutturali che conferiscono maggiore stabilità e un tempo di permanenza a livello corneo-congiuntivale superiore al suo precursore, in quanto viene degradato più lentamente dall'enzima ialuronidasi.

La struttura reticolata dell'acido ialuronico assicura una migliore idratazione e stabilizza il film lacrimale. Risulta, quindi, utile nel trattamento sintomatico dell'occhio secco.

"CROSSVISION PLUS" contiene anche: acque distillate di Camomilla e Malva per assicurare un'azione idratante, sodio cloruro e tampone fosfato per assicurare una soluzione fisiologica.

Questa formula è stata sviluppata per donare il massimo comfort già dai primi istanti dopo l'applicazione. È indicata per un utilizzo quotidiano sia diurno che notturno.

"CROSSVISION PLUS" è compatibile con lenti a contatto morbide.

INDICAZIONI D'USO

"CROSSVISION PLUS" è indicato per:

- Per ristabilire e migliorare la stabilità del film lacrimale in caso di sindrome dell'occhio secco;
- Per alleviare gli occhi in caso di arrossamento, secchezza e discomfort oculare dovuti a:
 - fattori ambientali (aria condizionata, eccessiva esposizione alla luce del sole, vento, fumo, inquinamento, acqua di mare o di piscina e salsedine);
 - eccessivo affaticamento dovuto a: studio, lavoro al computer per lunghi periodi;
 - anormale lacrimazione in seguito ad infiammazione;
 - anormale lacrimazione in seguito a chirurgia oculare;
 - utilizzo di lenti a contatto morbide o semi-rigide;
 - chirurgia refrattiva.

COMPOSIZIONE

Sodio ialuronato reticolato in soluzione acquosa (di cui sodio ialuronato reticolato 0.3%), acqua distillata di Camomilla, acqua distillata di Malva, sodio fosfato dibasico dodecaidrato, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili. Non contiene conservanti.

ISTRUZIONI D'USO

- Lavare e asciugare accuratamente le mani prima dell'uso
- Prima della somministrazione rimuovere il sigillo di garanzia;
- Aprire il flacone rimuovendo il tappo di protezione;
- Capovolgere il flacone ed esercitare una lieve pressione sul flacone per instillare 2 gocce in ogni occhio, se non diversamente prescritto;
- Dopo aver erogato la prima goccia aspettare qualche secondo prima di schiacciare nuovamente la bottiglia. Questo permetterà all'aria di ritornare nel sistema facilitando l'erogazione della goccia successiva;
- In ragione delle caratteristiche intrinseche del flacone con erogatore per soluzioni senza conservanti, al progressivo svuotamento del flacone potrebbe essere necessario esercitare una pressione maggiore per consentire la fuoriuscita del prodotto. Una piccola quantità di soluzione rimane sempre all'interno del flacone;
- Dopo l'uso agitare il flacone per rimuovere l'eventuale prodotto in eccesso prima di riposizionare il tappo sul contenitore;
- Dopo l'uso richiudere immediatamente il flacone con il tappo;
- Se, dopo l'uso, il flacone risultasse schiacciato, attendere che ritorni nella forma originale prima di chiuderlo con l'apposito tappo;
- Non toccare la punta dell'applicatore, nemmeno con gli occhi o le dita;
- Dopo la prima apertura, il contenuto del flacone può essere riutilizzato entro 3 mesi.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Se ha un grave danno allo strato trasparente più esterno dell'occhio (la cornea), i fosfati presenti in questo prodotto possono causare in casi molto rari macchie opache sulla cornea dovute ad accumulo di calcio durante il trattamento;
- Il prodotto è utilizzabile soltanto da una persona;
- Il prodotto è soltanto per uso oftalmico;
- Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso;
- Non utilizzare il prodotto se ci sono particelle visibili e/o cambiamenti nel colore della soluzione;
- Durante l'applicazione, non toccare l'occhio e nessun'altra superficie con l'estremità di erogazione del contenitore;
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione e/o piante Asteraceae e/o piante Malvacee;
- Il prodotto non è adatto ai bambini;
- Non sono riportate interazioni con farmaci o altre gocce oculari; in ogni caso, lasciare trascorrere almeno 15 minuti prima di somministrare qualsiasi altra goccia oculare;
- In caso di problemi durante il trattamento, interromperne l'uso e consultare un medico;
- Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza riportata sulla confezione;
- Smaltire il prodotto in base alle normative locali sulla gestione dei rifiuti;
- Tenere fuori dalla portata dei bambini;
- Consultare il medico prima dell'utilizzo in casi di gravidanza o allattamento;
- Per uso esterno, non ingerire;
- Non tentare di manomettere o smontare l'ugello dalla bottiglia;

- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'Autorità Competente dello Stato membro in cui si è stabiliti.

EFFETTI INDESIDERATI

Subito dopo l'applicazione, si potrebbe verificare un blando offuscamento della vista che scompare rapidamente. Si consiglia quindi di attendere qualche secondo prima di effettuare qualsiasi attività che richieda una visione chiara.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare ad una temperatura compresa tra 2°C e 30°C in un luogo asciutto, lontano dal calore, evitando l'esposizione diretta alla luce solare.

Il contenuto può essere riutilizzato entro 3 mesi dalla prima apertura.

CONFEZIONAMENTO

La confezione è composta da un flacone polidose con tappo OSD (ophthalmic squeeze dispenser), contenente 10 mL di soluzione oftalmica.

VALIDITÀ

A confezione integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione e sull'etichetta.



DT/01/DT/004



C.O.C. Farmaceutici S.r.l.

Via Modena, 15 - 40019

Sant'Agata Bolognese (BO) Italia

Ultima Revisione: 02.01 del 10/2022



C.O.C. Farmaceutici srl
Via Modena, 15
40019 - S. Agata Bolognese (BO) ITALIA
Via Chiesa Sud, 156 C/D/E/F/G
41016 - Rovereto s/S - Novi di Modena (MO) ITALIA

Cap. Soc. € 1200.000 I.V.
C.F. e Iscr. Reg.
Impr. di Bologna 03541870378
P.IVA IT 01603491208
R.E.A. Bologna N. 299432



Tubilux Pharma S.p.A.
Via Costarica, 20/22
00071 Pomezia (Roma)
ITALIA

cap. soc. € 472.500,00 I.V.
C.F. / P.IVA 05406661008
R.E.A. Roma N. 883476