

# MIRTHILLA NATURAL

"Mirthilla Natural" è una soluzione sterile ad uso oftalmico, con pH fisiologico. L'azione principale del dispositivo è di lubrificare e idratare la superficie oculare, grazie al sodio ialuronato e all'ipromellosa. "Mirthilla Natural" è indicato per il sollievo di rossore, fatica, discomfort e secchezza oculare.

Il sodio ialuronato è utilizzato per la sua azione idratante e lubrificante, che contrasta la secchezza oculare e crea un film che protegge l'epitelio corneale dagli agenti ambientali.

L'ipromellosa è un polimero con proprietà muco-mimetiche in grado di stabilizzare il film lacrimale sulla superficie della cornea creando uno scudo protettivo, trasparente e viscoelastico.

Il sodio ialuronato è una molecola già naturalmente presente nel corpo umano dove è necessaria una costante lubrificazione (come la cartilagine, la pelle, il film lacrimale) e quindi biocompatibile. Questo lubrificante, insieme all'ipromellosa, offre un'idratazione intensa e duratura sulla superficie oculare.

I lubrificanti attirano e trattengono l'acqua dall'ambiente e formano uno scudo lubrificante sulla superficie dell'occhio. Poiché questo scudo viscoso rilascia progressivamente l'acqua, "Mirthilla Natural" fornisce un'idratazione prolungata degli occhi.

Inoltre, "Mirthilla Natural" contiene cloruro di sodio e tampone borato per garantire una soluzione fisiologica e acque distillate di rosa canina, aloe, camomilla e mirtillo per assicurare un'azione idratante.

"Mirthilla Natural" non contiene conservanti o tamponi fosfato.

"Mirthilla Natural" è compatibile con lenti a contatto.

## INDICAZIONI D'USO

"Mirthilla Natural" svolge un'azione idratante e lubrificante sulla superficie oculare, alleviando arrossamenti, affaticamento e discomfort degli occhi e della mucosa oculare causati da fattori ambientali (vento, fumo, inquinamento, esposizione prolungata ai raggi solari, sale marino e acqua) e dall'uso prolungato del computer; agisce inoltre contro la sindrome dell'occhio secco.

- Assicura anche il sollievo dallo stress oftalmico dovuto all'uso di lenti a contatto e alla chirurgia a livello della superficie oculare.
- Inoltre, il collirio ha una viscosità ottimale che rende il dispositivo particolarmente utile per facilitare l'applicazione o la rimozione delle lenti a contatto, evitando fastidiosi fenomeni di arrossamento degli occhi, soprattutto negli adulti in cui può verificarsi più facilmente uno squilibrio del film lacrimale.

## COMPOSIZIONE

0,2% sodio ialuronato, 0,2% ipromellosa (HPMC), acqua distillata di Rosa canina (*Rosa canina*), acqua distillata di Aloe (*Aloe barbadensis Miller*), acqua distillata di Camomilla (*Chamomilla*)

recutita), acqua distillata di Mirtillo (*Vaccinium myrtillus*), acido borico, sodio tetraborato decaidrato, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

## ISTRUZIONI D'USO

- Lavare e asciugare accuratamente le mani prima dell'uso;
- Strappare il sigillo antimanomissione prima della prima somministrazione;
- Rimuovere il cappuccio di protezione;
- Premere il contenitore e instillare nell'occhio 2 o 3 gocce di "Mirthilla Natural"; non applicare più di 10 dosi (2-3 gocce per occhio) al giorno;
- Dopo aver erogato la prima goccia aspettare qualche secondo prima di schiacciare nuovamente la bottiglia. Questo permetterà all'aria di ritornare nel sistema facilitando l'erogazione della goccia successiva;
- In ragione delle caratteristiche intrinseche del flacone con erogatore per soluzioni senza conservanti, al progressivo svuotamento del flacone potrebbe essere necessario esercitare una pressione maggiore per consentire la fuoriuscita del prodotto. Una piccola quantità di soluzione rimane sempre all'interno del flacone;
- Se si ritiene di aver mancato l'occhio, somministrare un'altra goccia;
- Ripetere il procedimento per l'altro occhio, se necessario;
- Dopo l'uso agitare il flacone per rimuovere l'eventuale prodotto in eccesso prima di riposizionare il tappo sul contenitore;
- Dopo l'uso richiudere immediatamente il flacone con il tappo;
- Se, dopo l'uso, il flacone risultasse schiacciato, attendere che ritorni nella forma originale prima di chiuderlo con l'apposito tappo;
- Non toccare la punta dell'applicatore, nemmeno con gli occhi o le dita;
- Il prodotto può essere riutilizzato entro 3 mesi dalla prima apertura;
- "Mirthilla Natural" può essere utilizzato con lenti a contatto.

## AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto contiene le seguenti sostanze CMR in concentrazioni superiori a 0,1% v/vp/p: acido borico e sodio tetraborato decaidrato. Il prodotto non è indicato per bambini, donne in gravidanza o in allattamento.
- Subito dopo l'applicazione, si potrebbe verificare un blando offuscamento della vista. Possono altresì verificarsi temporaneamente lievi bruciori/pizzicore/irritazioni come risultato dell'irritazione degli occhi. Se uno qualsiasi di questi effetti persiste o peggiora, informare immediatamente il medico.
- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Il prodotto è monopaziente.
- Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso.
- Non utilizzare il prodotto se si osservano particelle e/o alterazioni del colore della soluzione.
- Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del contenitore
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione e/o in caso di allergie alle piante della famiglia delle Asteraceae e/o Liliaceae e/o Ericaceae e/o Rosaceae.
- Non sono riportate interazioni con farmaci o altri colliri; attendere comunque 15 minuti prima di instillare qualsiasi altra goccia oculare.
- In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.

- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Smaltire il prodotto in accordo alla normativa locale sui rifiuti.
- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Per uso esterno. Non ingerire.
- Non cercare di svitare o manomettere l'erogatore del flacone.
- Segnalare qualsiasi incidente grave, verificatosi in relazione al dispositivo, al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore è stabilito.

## EFFETTI COLLATERALI

Al momento non sono noti effetti collaterali.

## CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Conservare a temperatura inferiore a 30 °C.

Il contenuto del flacone può essere riutilizzato entro 3 mesi dalla prima apertura.

## CONFEZIONAMENTO

Un flacone da 10 ml di soluzione sterile senza conservanti.

## VALIDITÀ

A confezione integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione e sul flacone.



DT/01/DT/002



**C.O.C. Farmaceutici S.r.l.**

Via Modena, 15 - 40019

Sant'Agata Bolognese (BO) Italia

Ultima Revisione: 02.01 del 10/2022



**C.O.C. Farmaceutici srl**

Via Modena, 15  
40019 - S. Agata Bolognese (BO) ITALIA  
Via Chiesa Sud, 156 C/D/E/F/G  
41016 - Rovereto s/S - Novi di Modena (MO) ITALIA

Cap. Soc. € 1.200.000 I.V.  
C.F. e Iscr. Reg.  
Impr. di Bologna 03541870378  
P.IVA IT 01603491208  
R.E.A. Bologna N. 299432



**Tubilux Pharma S.p.A.**

Via Costarica, 20/22  
00071 Pomezia (Roma)  
ITALIA

cap. soc. € 472.500,00 I.V.  
C.F. / P.IVA 05406661008  
R.E.A. Roma N. 883476