

CROSSVISION LIGHT

A base di Acido ialuronico reticolato
Da 5 a 20 monodose richiudibili da 0,5 ml

Crossvision light è una soluzione oftalmica sterile a pH fisiologico a base di acido ialuronico reticolato. L'acido ialuronico è un mucopolisaccaride che in seguito all'ammiccamento si distribuisce uniformemente sulla superficie oculare grazie alle sue particolari proprietà mucomimetiche e pseudoplastiche, mentre l'agente reticolante agisce in modo sinergico potenziando e prolungando l'azione umettante. **Crossvision light** ottiene in tal modo un elevato livello di idratazione e persistenza sulla superficie oculare, in grado anche di favorire una più elevata stabilità del film lacrimale e una migliore e più rapida riparazione e rigenerazione dell'epitelio corneale.

Crossvision light viene pertanto utilizzato per la sua azione lubrificante, idratante prolungata e riparatrice come gocce oculari in grado di donare sollievo ad occhi secchi, irritati o stanchi.

Crossvision light allevia l'arrossamento, l'affaticamento e il senso di fastidio agli occhi e alla mucosa oculare causati da fattori ambientali quali vento, fumo, inquinamento, esposizione prolungata ai raggi solari, salsedine, acqua del mare o della piscina o dovuti a intenso impegno per studio, lavoro, uso prolungato del computer o per un lungo periodo di guida. Idrata e lubrifica la cornea e la congiuntiva in caso di secchezza oculare dovuta all'uso di lenti a contatto.

Crossvision light conferisce un elevato grado di idratazione prolungata nel tempo e protegge la superficie corneale. Risulta pertanto indicato come coadiuvante nella sintomatologia da sindrome da occhio secco e specialmente dopo chirurgia refrattiva.

La formula è stata studiata per assicurare il massimo comfort già nei primi istanti dopo l'applicazione. È indicato per l'uso quotidiano e notturno.

Non contiene conservanti e/o molecole ad azione anti-infiammatoria e vaso-costrittiva.

Crossvision light è compatibile con lenti a contatto.

ISTRUZIONI D'USO

Crossvision light è indicato per dare sollievo agli occhi in caso di rossore, affaticamento e fastidio degli occhi o della mucosa oculare dovuti a:

- fattori ambientali (aria condizionata, riscaldamento artificiale, esposizione eccessiva alle radiazioni solari, vento, fumo, inquinamento, acqua di mare o di piscina e salsedine).
- secchezza degli occhi in seguito ad eccessivo affaticamento dovuto a: studio, lavoro al computer per lunghi periodi
- utilizzo di lenti a contatto morbide o semirigide.

Inoltre può essere utilizzato, su indicazione del medico specialista, nei seguenti casi:

- anomalie lacrimali secondarie a blefarite cronica e alterazioni della qualità o quantità delle lacrime note come "sindrome dell'occhio secco".

- anomalie lacrimali secondarie a chirurgia oculare di varia natura o chirurgia estetica della regione palpebrale.
- miglioramento della stabilità della funzione lacrimale dopo chirurgia refrattiva.

COMPOSIZIONE

Sodio ialuronato reticolato in soluzione acquosa (di cui sodio ialuronato reticolato 0.02%), sodio fosfato bibasico dodecaidrato, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio cloruro, acqua p.p.i.. Non contiene conservanti.

ISTRUZIONI D'USO

- Lavare accuratamente le mani.
- Aprire la busta di alluminio.
- Staccare il monodose dallo strip.
- Aprire il monodose ruotando e poi sollevando il tappo di chiusura.
- Riporre il tappo con il perno di chiusura verso l'alto.
- Instillare 2 gocce in ciascun occhio premendo leggermente il monodose, secondo necessità o secondo parere del medico.
- Dopo l'uso, richiudere immediatamente il monodose: il contenuto può essere riutilizzato entro 12 ore dalla prima apertura.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Il prodotto è utilizzabile esclusivamente da un solo paziente.
- Somministrare il prodotto prima di indossare le lenti a contatto.
- Non utilizzare il prodotto se la busta di alluminio o il contenitore risultassero, al momento della prima apertura, danneggiati o non perfettamente chiusi.
- Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del contenitore.
- Non usare il prodotto se allergici o con ipersensibilità nota ad uno qualsiasi dei componenti.
- In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- La somministrazione di farmaci per uso oftalmico in contemporanea con le gocce oculari deve essere svolta sotto controllo del medico che ne può valutare le possibili interazioni e dovrebbe essere effettuata almeno a 15 minuti di distanza dall'instillazione delle gocce oculari.
- Dopo l'applicazione del prodotto può risultare un lieve e passeggero offuscamento visivo.
- In caso di irritazione oculare interrompere l'utilizzo e contattare uno specialista.
- Non ingerire.
- Il prodotto è normalmente destinato ad un uso continuo per non più di 30 giorni; se i sintomi persistono, consultare il medico.
- In caso di gravidanza o allattamento consultare il medico prima dell'uso.

Effetti collaterali

Non sono stati riportati effetti indesiderati dopo somministrazione del prodotto.

CONFEZIONAMENTO

Da 5 a 20 monodose richiudibili da 0,5 ml

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Conservare ad una temperatura compresa tra 2°C e 30°C in un luogo asciutto, lontano dal calore, evitando l'esposizione diretta al sole.

Conservare i monodose non utilizzati nella busta di alluminio.

VALIDITÀ

A confezione integra non superare la data di scadenza riportata sulla confezione e sul monodose.

C.O.C. Farmaceutici S.r.l.

Via Modena, 15 - 40019
Sant'Agata Bolognese (Bo)
Italia

Distribuito da: _____

STERILE A

CE 0546

DISPOSITIVO MEDICO

Ultima Revisione: 05.01 del 11/2020



C.O.C. Farmaceutici srl
Via Modena, 15
40019 - S. Agata Bolognese (BO) ITALIA
Via Chiesa Sud, 156 C/D/E/F/G
41016 - Rovereto s/S - Novi di Modena (MO) ITALIA

Cap. Soc. € 1200.000 I.V.
C.F. e Iscr. Reg.
Impr. di Bologna 03541870378
P.IVA IT 01603491208
R.E.A. Bologna N. 299432



Tubilux Pharma S.p.A.
Via Costarica, 20/22
00071 Pomezia (Roma)
ITALIA

cap. soc. € 472.500,00 I.V.
C.F. / P.IVA 05406661008
R.E.A. Roma N. 883476