

# HYDRAMILLA HY 0,5%

Gocce oculari a base di ipromellosa  
Flacone 10 ml, Senza conservanti

**Hydramalla HY 0.5%** è una soluzione oftalmica sterile a base di ipromellosa, con azione lenitiva ed emolliente e pH fisiologico.

Grazie al sistema di chiusura OSD, atto a preservare le caratteristiche microbiologiche, chimiche e fisiche della soluzione, **Hydramalla HY 0.5%** non contiene conservanti.

L'ipromellosa è un polimero viscoso con proprietà umettanti e mucomimetiche che creando uno scudo protettivo, trasparente e viscoelastico contribuisce a stabilizzare il film lacrimale. Grazie alle sue proprietà ipromellosa protegge e lubrifica la superficie oculare riducendo la sensazione di secchezza oculare e dona un sollievo a lunga durata agli occhi irritati, contribuendo a ristabilire il naturale film oculare.

**Hydramalla HY 0.5%** diminuisce i sintomi di secchezza agli occhi, bruciore, prurito e sensazione di corpo estraneo.

**Hydramalla HY 0.5%** ha un'azione umettante e lubrificante; dà sollievo ad occhi secchi causati da un uso eccessivo del PC, ammiccamento frequente, inquinamento atmosferico, aria condizionata, riscaldamento, vento e sole.

**Hydramalla HY 0.5%** dona sollievo ad occhi stressati dall'uso delle lenti a contatto.

**Hydramalla HY 0.5%** è compatibile con lenti a contatto.

**Hydramalla con 0,5% di ipromellosa** è consigliata, sotto supervisione medica, in caso di una sindrome severa da occhio secco, come coadiuvante alle terapie modificanti la malattia.

## COMPOSIZIONE

Idrossipropilmetilcellulosa (HPMC), sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio fosfato dibasico dodecaidrato, sodio cloruro, acqua p.p.i q.b. a 100 ml. Non contiene conservanti.

## ISTRUZIONI D'USO

- Prima della prima somministrazione rimuovere il tamper-evident;
- Rimuovere il tappo di protezione e aprire il flacone;
- ***In ragione delle caratteristiche intrinseche del flacone con erogatore per soluzioni senza conservanti, al progressivo svuotamento del flacone potrebbe essere necessario esercitare una pressione maggiore per consentire la fuoriuscita del prodotto;***
- Instillare 1/2 gocce in ciascun occhio premendo leggermente il flacone;
- Dopo l'uso scuotere il flacone verso il basso in modo da allontanare un'eventuale goccia residua di soluzione e richiudere immediatamente il flacone: il contenuto può essere riutilizzato entro 3 mesi dalla prima apertura.

- Indicato anche per uso frequente, più volte al giorno (3 o 4 volte o più se necessario) o in accordo alle indicazioni del medico.

La visione può essere temporaneamente offuscata dopo la somministrazione del prodotto. Altresì possono verificarsi temporaneamente bruciore / pizzicore / irritazione come conseguenza dell'irritazione oculare stessa.

Se uno qualsiasi di questi effetti persiste o peggiora consultare il medico.

## AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Il prodotto è monopaziente.
- Somministrare il prodotto prima di indossare le lenti a contatto.
- Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso.
- Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del contenitore.
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
- La somministrazione di farmaci per uso oftalmico in contemporanea con le gocce oculari deve essere svolta sotto controllo del medico che ne può valutare le possibili interazioni e dovrebbe essere effettuata almeno a 15 minuti di distanza dall'instillazione delle gocce oculari.
- In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non ingerire.
- Il prodotto è normalmente destinato ad un uso continuo per non più di 30 giorni; se i sintomi persistono, consultare il medico.
- In caso di gravidanza o allattamento consultare il medico prima dell'uso.
- **Hydramilla HY 0.5%** non è indicato per il trattamento di infezioni e altre patologie oculari. Tali condizioni richiedono l'intervento del medico.

## CONFEZIONAMENTO

Flacone da 10 ml, senza conservanti.

## CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Conservare a temperatura inferiore a 30°C

Dopo la prima apertura il contenuto può essere riutilizzato entro 3 mesi.

## VALIDITÀ

A confezionamento integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione.

**C.O.C. Farmaceutici S.r.l.**  
Via Modena, 15 - 40019  
Sant'Agata Bolognese (Bo)  
Italia

**CE** 0546  
DISPOSITIVO MEDICO

Distribuito da: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**STERILE A**

**Ultima Revisione: 05.01 del 01/2021**



**C.O.C. Farmaceutici srl**  
Via Modena, 15  
40019 - S. Agata Bolognese (BO) ITALIA  
Via Chiesa Sud, 156 C/D/E/F/G  
41016 - Rovereto s/S - Novi di Modena (MO) ITALIA

Cap. Soc. € 1.200.000 I.V.  
C.F. e Iscr. Reg.  
Impr. di Bologna 03541870378  
P.IVA IT 01603491208  
R.E.A. Bologna N. 299432



**Tubilux Pharma S.p.A.**  
Via Costarica, 20/22  
00071 Pomezia (Roma)  
ITALIA

cap. soc. € 472.500,00 I.V.  
C.F. / P.IVA 05406661008  
R.E.A. Roma N. 883476