

# HYDRAMILLA CL 0,5%

Gocce oculari a base di carmellosa  
Flacone 10 ml, Senza conservanti

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO

**Hydramilla CL 0.5%** è una soluzione oftalmica sterile a base di carmellosa e con un pH fisiologico; per una forte idratazione e protezione della superficie oculare.

Grazie al sistema di chiusura OSD, atto a preservare le caratteristiche microbiologiche, chimiche e fisiche della soluzione, **Hydramilla CL 0.5%** non contiene conservanti. La soluzione è compatibile con le lenti a contatto.

La carmellosa (CMC) è un polisaccaride noto come mucillagine. Aumenta il tempo di permanenza della goccia sulla superficie oculare ed al contempo aumenta la viscosità del film lacrimale.

Grazie alle sue proprietà la carmellosa protegge l'occhio da possibili irritazioni e lubrifica la superficie oculare. Riduce la sensazione di secchezza oculare creando un film protettivo, trasparente e viscoelastico, contribuendo così a ristabilire il naturale film oculare.

**Hydramilla CL 0.5%** diminuisce i sintomi di secchezza agli occhi, bruciore, prurito e sensazione di corpo estraneo.

**Hydramilla CL 0.5%** ha un'azione lubrificante; dona sollievo ad occhi secchi causati da un uso eccessivo del PC, ammiccamento infrequente, trattamenti medici particolari, l'inquinamento atmosferico (es. aria condizionata, vento e sole) ed anche ad occhi stressati dall'uso delle lenti a contatto.

**Hydramilla con 0,5% di carmellosa** è consigliato in caso di sindrome moderata da occhio secco o più comunemente, in caso di sensazione di fastidio agli occhi.

## ISTRUZIONI D'USO

- Prima della prima somministrazione rimuovere il tamper-evident;
- Rimuovere il tappo di protezione e aprire il flacone;
- Instillare 1/2 gocce in ciascun occhio premendo leggermente il flacone;
- dopo l'instillazione, prima di richiudere il flacone con l'apposito tappo, scuotere il flacone per eliminare l'eventuale goccia residua sull'applicatore.
- Dopo l'uso, richiudere immediatamente il flacone: il contenuto può esser riutilizzato entro 3 mesi dalla prima apertura.
- Indicato anche per uso frequente, più volte al giorno (3 o 4 volte o più se necessario) o in accordo alle indicazioni del medico. Poiché l'occhio secco è una condizione che varia da

persona a persona, le gocce oculari possono essere utilizzate al bisogno per alleviare la sensazione di occhio secco.

In ragione delle caratteristiche intrinseche del flacone con erogatore per soluzioni senza conservanti, al progressivo svuotamento del flacone potrebbe essere necessario esercitare una pressione maggiore per consentire la fuoriuscita del prodotto.

## COMPOSIZIONE

**0.5 %** carmellosa sodica (carbossi-metil-cellulosa), acido bórico, sodio tetraborato decaidrato, sodio cloruro, acqua p.p.i.. Non contiene conservanti.

## AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Somministrare il prodotto prima di indossare le lenti a contatto.
- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Il prodotto è monopaziente.
- Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso.
- Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del contenitore.
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
- La somministrazione di farmaci per uso oftalmico in contemporanea con le gocce oculari deve essere svolta sotto controllo del medico che ne può valutare le possibili interazioni e dovrebbe essere effettuata almeno a 15 minuti di distanza dall'instillazione delle gocce oculari.
- In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non ingerire
- Il prodotto è normalmente destinato ad un uso continuo per non più di 30 giorni; se i sintomi persistono, consultare il medico.
- In caso di gravidanza o allattamento consultare il medico prima dell'uso.

## EFFETTI COLLATERALI

- La visione può essere temporaneamente offuscata dopo la somministrazione del prodotto.
- Come altre gocce oculari, possono verificarsi temporaneamente bruciore / pizzicore / irritazione come conseguenza dell'irritazione oculare stessa.

Se uno qualsiasi di questi effetti persiste o peggiora, consultare il medico.

## CONFEZIONAMENTO

Flacone da 10 ml, senza conservanti.

## CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Conservare a temperatura inferiore a 30°C

Dopo la prima apertura il contenuto può essere riutilizzato entro 3 mesi.

## VALIDITÀ

A confezione integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione e sull'etichetta del flacone.

**C.O.C. Farmaceutici S.r.l.**  
Via Modena, 15 - 40019  
Sant'Agata Bolognese (Bo)  
Italia

 **0546**  
DISPOSITIVO MEDICO

Distribuito da: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**STERILE A**

**Ultima Revisione: 04.01 del 10/2021**



**C.O.C. Farmaceutici srl**  
Via Modena, 15  
40019 - S. Agata Bolognese (BO) ITALIA  
Via Chiesa Sud, 156 C/D/E/F/G  
41016 - Rovereto s/S - Novi di Modena (MO) ITALIA

Cap. Soc. € 1200.000 I.V.  
C.F. e Iscr. Reg.  
Impr. di Bologna 03541870378  
PIVA IT 01603491208  
R.E.A. Bologna N. 299432



**Tubilux Pharma S.p.A.**  
Via Costarica, 20/22  
00071 Pomezia (Roma)  
ITALIA

cap. soc. € 472.500,00 I.V.  
C.F. / P.IVA 05406661008  
R.E.A. Roma N. 883476