

MIRTHILLA

Gocce oculari a base di ipromellosa e sodio ialuronato
Flacone 10 ml, Senza conservanti

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO

Mirthilla è una soluzione oftalmica sterile a base di ipromellosa e sodio ialuronato, con un pH fisiologico; per una prolungata azione idratante e lubrificante della superficie oculare.

Grazie al sistema di chiusura OSD, **Mirthilla** non contiene conservanti: questo consente l'utilizzo della soluzione anche da portatori di lenti a contatto. Somministrare prima di indossare le lenti a contatto.

L'ipromellosa è un polimero viscoso con proprietà umettanti e mucomimetiche che creando uno scudo protettivo, trasparente e viscoelastico contribuisce a stabilizzare il film lacrimale. Grazie alle sue proprietà ipromellosa protegge e lubrifica la superficie oculare riducendo la sensazione di secchezza oculare e dona un sollievo a lunga durata agli occhi irritati, contribuendo a ristabilire il naturale film oculare.

Il sodio ialuronato è un componente viscoso utilizzato per i suoi effetti idratante e lubrificante. Grazie alle sue proprietà crea un film viscoelastico e trasparente che protegge la mucosa oculare che va ad agire contro gli agenti esterni e contrasta un occhio moderatamente secco.

Mirthilla diminuisce i sintomi di secchezza agli occhi, bruciore, prurito e sensazione di corpo estraneo, contribuendo a ristabilire il naturale film oculare.

Mirthilla idrata e lubrifica a lungo la superficie oculare, dando sollievo prolungato ad occhi secchi causati da un uso eccessivo del PC, ammiccamento frequente, trattamenti medici particolari, inquinamento atmosferico (es. aria condizionata, vento e sole) ed anche ad occhi stressati dall'uso delle lenti oculari.

ISTRUZIONI D'USO

- Prima della prima somministrazione rimuovere il sigillo di garanzia;
- Aprire il flacone rimuovendo il tappo di protezione;
- Instillare 1/2 gocce in ciascun occhio premendo leggermente il flacone;
- Dopo l'uso, richiudere immediatamente il flacone avendo cura di agitare il flacone verso il basso per allontanare l'eventuale prodotto in eccesso prima di riposizionare il tappo sul contenitore;
- Il contenuto può esser riutilizzato entro 6 mesi dalla prima apertura;
- Indicato anche per uso frequente, più volte al giorno (2 o 3 volte o più se necessario) o in accordo alle indicazioni del medico. Poiché l'occhio secco è una condizione che varia da persona a persona, le gocce oculari possono essere utilizzate al bisogno per alleviare la sensazione di occhio secco.

In ragione delle caratteristiche intrinseche del flacone con erogatore per soluzioni senza conservanti, al progressivo svuotamento del flacone potrebbe essere necessario esercitare una pressione maggiore per consentire la fuoriuscita del prodotto.

COMPOSIZIONE

0.2 % sodio ialuronato, 0.2 % ipromellosa, acido borico, sodio tetraborato decaidrato, sodio cloruro, acqua p.p.i.. Non contiene conservanti ne fosfati.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Il prodotto è utilizzabile esclusivamente da un solo paziente.
- Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso.
- Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del contenitore.
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
- In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non somministrare altri farmaci o dispositivi medici per uso oftalmico nei 15 minuti successivi alla somministrazione di **Mirthilla**.
- Rimuovere le lenti a contatto prima di somministrare **Mirthilla**.
- In caso di donne in gravidanza e allattamento e soggetti che hanno subito interventi di chirurgia oculare consultare il medico prima dell'uso.

EFFETTI COLLATERALI COMUNI

- La visione può essere temporaneamente offuscata dopo la somministrazione del prodotto.
- Occasionalmente queste gocce oculari possono causare: arrossamento, pizzicore, sensazione di corpo estraneo e bruciore agli occhi, vischiosità delle ciglia, fotofobia, lacrimazione.
- L'uso prolungato può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione.

Se l'effetto persiste o peggiora consultare il medico.

CONFEZIONAMENTO

Flacone da 10 ml, senza conservanti.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Conservare a temperatura inferiore a 30°C

Dopo la prima apertura il contenuto può essere riutilizzato entro 6 mesi.

VALIDITÀ

A confezionamento integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione.

C.O.C. Farmaceutici S.r.l.

Via Modena, 15 - 40019
Sant'Agata Bolognese (Bo)
Italia

 **0546**
DISPOSITIVO MEDICO

Distribuito da: _____

STERILE A

Ultima Revisione: 04.01 del 03/2022



C.O.C. Farmaceutici srl
Via Modena, 15
40019 - S. Agata Bolognese (BO) ITALIA
Via Chiesa Sud, 156 C/D/E/F/G
41016 - Rovereto s/S - Novi di Modena (MO) ITALIA

Cap. Soc. € 1.200.000 I.V.
C.F. e Iscr. Reg.
Impr. di Bologna 03541870378
P.IVA IT 01603491208
R.E.A. Bologna N. 299432



Tubilux Pharma S.p.A.
Via Costarica, 20/22
00071 Pomezia (Roma)
ITALIA

cap. soc. € 472.500,00 I.V.
C.F. / P.IVA 05406661008
R.E.A. Roma N. 883476