

BLUEMILLA

"BLUEMILLA" è una soluzione oftalmica idratante e lubrificante sterile, a pH fisiologico, a base di ialuronato di sodio, ripartita in un flacone polidose.

Il sodio ialuronato viene utilizzato per il suo effetto idratante e lubrificante, che contrasta la secchezza oculare e crea un film che protegge l'epitelio corneale dagli agenti ambientali. La formula contiene anche cloruro di sodio e un tampone fosfato, quali sodio fosfato bibasico eptaidrato e sodio fosfato monobasico diidrato, per garantire una soluzione fisiologica e le acque distillate di camomilla e fiordaliso per assicurare un'azione idratante.

INDICAZIONI D'USO

"BLUEMILLA" è indicato in caso di secchezza oculare o discomfort dell'occhio o della mucosa oculare dovuti a:

- fattori ambientali (aria condizionata, esposizione prolungata a raggi solari, vento, fumo, inquinamento, acqua di mare o piscina);
- secchezza oculare dovuta a eccessiva stanchezza dovuta a lunghe ore di lavoro al computer oppure allo studio o alla sindrome dell'occhio secco;
- utilizzo per molte ore al giorno di lenti a contatto.

COMPOSIZIONE

Sodio ialuronato 0.1%, Acqua distillata di Fiordaliso, Acqua distillata di Camomilla, Sodio fosfato bibasico eptaidrato, Sodio fosfato monobasico biidrato, Sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili. Non contiene conservanti.

ISTRUZIONI D'USO

- Lavare e asciugare accuratamente le mani prima dell'uso;
- Strappare il sigillo antimanomissione prima della prima somministrazione;
- Rimuovere il cappuccio di protezione;
- Premere il contenitore e instillare nell'occhio 2 o 3 gocce di "BLUEMILLA";
- Dopo aver erogato la prima goccia aspettare qualche secondo prima di schiacciare nuovamente la bottiglia. Questo permetterà all'aria di ritornare nel sistema facilitando l'erogazione della goccia successiva;
- In ragione delle caratteristiche intrinseche del flacone con erogatore per soluzioni senza conservanti, al progressivo svuotamento del flacone potrebbe essere necessario esercitare una pressione maggiore per consentire la fuoriuscita del prodotto. Una piccola quantità di soluzione rimane sempre all'interno del flacone;

- Dopo l'uso agitare il flacone per rimuovere l'eventuale prodotto in eccesso prima di riposizionare il tappo sul contenitore;
- Dopo l'uso richiudere immediatamente il flacone con il tappo;
- Se, dopo l'uso, il flacone risultasse schiacciato, attendere che ritorni nella forma originale prima di chiuderlo con l'apposito tappo;
- Non toccare la punta dell'applicatore, nemmeno con gli occhi o le dita;
- Il prodotto può essere riutilizzato entro 3 mesi dalla prima apertura;
- "BLUEMILLA" può essere utilizzato anche più volte al giorno in base alle esigenze personali o al parere di un medico;
- "BLUEMILLA" può essere utilizzato con lenti a contatto.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Il prodotto è monopaziente.
- Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso.
- Non utilizzare il prodotto se si osservano particelle e/o alterazioni del colore della soluzione.
- Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del contenitore
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione e/o in caso di allergie alle piante appartenenti alla famiglia delle Asteraceae.
- Se ha un grave danno allo strato trasparente più esterno dell'occhio (la cornea), i fosfati presenti in questo prodotto possono causare in casi molto rari macchie opache sulla cornea dovute ad accumulo di calcio durante il trattamento.
- Non sono riportate interazioni con farmaci o altri colliri; attendere comunque 15 minuti prima di instillare qualsiasi altra goccia oculare.
- In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Smaltire il prodotto in accordo alla normativa locale sui rifiuti.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di gravidanza o allattamento consultare il medico prima dell'uso.
- Per uso esterno. Non ingerire.
- Non cercare di svitare o manomettere l'erogatore del flacone.
- Segnalare qualsiasi incidente grave, verificatosi in relazione al dispositivo, al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore è stabilito.

EFFETTI COLLATERALI

Al momento non sono noti effetti collaterali.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Conservare a temperatura inferiore a 30 °C.

Il contenuto del flacone può essere riutilizzato entro 3 mesi dalla prima apertura.

CONFEZIONAMENTO

Un flacone da 10 ml di soluzione sterile senza conservanti.

VALIDITÀ

A confezionamento integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione e sul flacone.



DT/01/DT/001



C.O.C. Farmaceutici S.r.l.

Via Modena, 15 - 40019

Sant'Agata Bolognese (BO) Italia

Ultima Revisione: 02.01 del 10/2022



C.O.C. Farmaceutici srl

Via Modena, 15
40019 - S. Agata Bolognese (BO) ITALIA
Via Chiesa Sud, 156 C/D/E/F/G
41016 - Rovereto s/S - Novi di Modena (MO) ITALIA

Cap. Soc. € 1.200.000 I.V.
C.F. e Iscr. Reg.
Impr. di Bologna 03541870378
P.IVA IT 01603491208
R.E.A. Bologna N. 299432



Tubilux Pharma S.p.A.

Via Costarica, 20/22
00071 Pomezia (Roma)
ITALIA

cap. soc. € 472.500,00 I.V.
C.F. / P.IVA 05406661008
R.E.A. Roma N. 883476