

BLUEMILLA

"BLUEMILLA" è una soluzione oftalmica idratante e lubrificante sterile, a pH fisiologico, a base di ialuronato di sodio, ripartita in flaconcini monodose.

Il sodio ialuronato viene utilizzato per il suo effetto idratante e lubrificante, che contrasta la secchezza oculare e crea un film che protegge l'epitelio corneale dagli agenti ambientali. La formula contiene anche cloruro di sodio e un tampone fosfato, quali sodio fosfato bibasico eptaidrato e sodio fosfato monobasico diidrato, per garantire una soluzione fisiologica e le acque distillate di camomilla e fiordaliso per assicurare un'azione idratante.

INDICAZIONI D'USO

"BLUEMILLA" è indicato in caso di secchezza oculare o discomfort dell'occhio o della mucosa oculare dovuti a:

- fattori ambientali (aria condizionata, esposizione prolungata a raggi solari, vento, fumo, inquinamento, acqua di mare o piscina);
- secchezza oculare dovuta a eccessiva stanchezza dovuta a lunghe ore di lavoro al computer oppure allo studio o alla sindrome dell'occhio secco;
- utilizzo per molte ore al giorno di lenti a contatto.

COMPOSIZIONE

Sodio ialuronato 0.1%, Acqua distillata di Fiordaliso, Acqua distillata di Camomilla, Sodio fosfato bibasico eptaidrato, Sodio fosfato monobasico biidrato, Sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili. Non contiene conservanti.

ISTRUZIONI D'USO

- Lavare e asciugare accuratamente le mani prima dell'uso;
- Staccare il contenitore monodose dallo strip;
- Ruotare e togliere il tappo per rompere il sigillo;
- Posizionare il tappo avendo cura di appoggiarlo su una superficie pulita;
- Instillare 2/3 gocce in ciascun occhio comprimendo delicatamente il contenitore monodose;
- Dopo l'uso chiudere immediatamente il contenitore monodose: il contenuto va consumato entro 12 ore;
- "BLUEMILLA" può essere utilizzato anche più volte al giorno in base alle esigenze personali o al parere di un medico;

- "BLUEMILLA" può essere utilizzato con lenti a contatto.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Il prodotto è monopaziente.
- Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso.
- Non utilizzare il prodotto se si osservano particelle e/o alterazioni del colore della soluzione.
- Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del contenitore
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione e/o in caso di allergie alle piante appartenenti alla famiglia delle Asteraceae.
- Se ha un grave danno allo strato trasparente più esterno dell'occhio (la cornea), i fosfati presenti in questo prodotto possono causare in casi molto rari macchie opache sulla cornea dovute ad accumulo di calcio durante il trattamento.
- Non sono riportate interazioni con farmaci o altri colliri; attendere comunque 15 minuti prima di instillare qualsiasi altra goccia oculare.
- In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Smaltire il prodotto in accordo alla normativa locale sui rifiuti.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di gravidanza o allattamento consultare il medico prima dell'uso.
- Per uso esterno. Non ingerire.
- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave, verificatosi in relazione al dispositivo, al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore è stabilito.

EFFETTI COLLATERALI

Al momento non sono noti effetti collaterali.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Conservare a temperatura ambiente (15°C-25°C).

Il contenuto del monodose può essere riutilizzato entro 12 ore dalla prima apertura.

CONFEZIONAMENTO

Da 5 a 30 monodose richiudibili da 0,5 ml.

VALIDITÀ

A confezionamento integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione.

CE 0051

MD

STERILE A

#

DT/01/DT/001



C.O.C. Farmaceutici S.r.l.

Via Modena, 15 - 40019

Sant'Agata Bolognese (BO) Italia

Ultima Revisione: 02.01 del 10/2022



C.O.C. Farmaceutici srl

Via Modena, 15
40019 - S. Agata Bolognese (BO) ITALIA
Via Chiesa Sud, 156 C/D/E/F/G
41016 - Rovereto s/S - Novi di Modena (MO) ITALIA

Cap. Soc. € 1.200.000 I.V.
C.F. e Iscr. Reg.
Impr. di Bologna 03541870378
P.IVA IT 01603491208
R.E.A. Bologna N. 299432



Tubilux Pharma S.p.A.

Via Costarica, 20/22
00071 Pomezia (Roma)
ITALIA

cap. soc. € 472.500,00 I.V.
C.F. / P.IVA 05406661008
R.E.A. Roma N. 883476