

CROSSVISION PLUS

"CROSSVISION PLUS" è una soluzione sterile per uso oftalmico, a pH fisiologico, a base di acido ialuronico reticolato ed acque distillate di camomilla e malva.

L'acido ialuronico reticolato, ottenuto con tecnologia brevettata, conserva tutte le proprietà dell'acido ialuronico lineare con caratteristiche strutturali che conferiscono maggiore stabilità e un tempo di permanenza a livello corneo-congiuntivale superiore al suo precursore, in quanto viene degradato più lentamente dall'enzima ialuronidasi.

La struttura reticolata dell'acido ialuronico assicura una migliore idratazione e stabilizza il film lacrimale. Risulta, quindi, utile nel trattamento sintomatico dell'occhio secco.

"CROSSVISION PLUS" contiene anche: acque distillate di Camomilla e Malva per assicurare un'azione idratante, sodio cloruro e tampone fosfato per assicurare una soluzione fisiologica.

Questa formula è stata sviluppata per donare il massimo comfort già dai primi istanti dopo l'applicazione. È indicata per un utilizzo quotidiano sia diurno che notturno.

"CROSSVISION PLUS" è compatibile con lenti a contatto morbide.

INDICAZIONI D'USO

"CROSSVISION PLUS" è indicato per:

- Per ristabilire e migliorare la stabilità del film lacrimale in caso di sindrome dell'occhio secco;
- Per alleviare gli occhi in caso di arrossamento, secchezza e discomfort oculare dovuti a:
 - fattori ambientali (aria condizionata, eccessiva esposizione alla luce del sole, vento, fumo, inquinamento, acqua di mare o di piscina e salsedine);
 - eccessivo affaticamento dovuto a: studio, lavoro al computer per lunghi periodi;
 - anormale lacrimazione in seguito ad infiammazione;
 - anormale lacrimazione in seguito a chirurgia oculare;
 - utilizzo di lenti a contatto morbide o semi-rigide;
 - chirurgia refrattiva.

COMPOSIZIONE

Sodio ialuronato reticolato in soluzione acquosa (di cui sodio ialuronato reticolato 0.3%), acqua distillata di Camomilla, acqua distillata di Malva, sodio fosfato dibasico dodecaidrato, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili. Non contiene conservanti.

ISTRUZIONI D'USO

- Lavare e asciugare accuratamente le mani prima dell'uso;
- Aprire la busta di alluminio;
- Staccare il monodose dallo strip e aprirlo ruotando e poi sollevando il tappo di chiusura. Non gettare il tappo ma utilizzarlo per richiudere il monodose;
- Riporre il tappo assicurandosi di metterlo su una superficie pulita;
- Instillare 2 gocce per ogni occhio premendo leggermente il monodose;
- Dopo l'utilizzo richiudere immediatamente il monodose: il contenuto può essere riutilizzato entro 12 ore dalla prima apertura.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Se ha un grave danno allo strato trasparente più esterno dell'occhio (la cornea), i fosfati presenti in questo prodotto possono causare in casi molto rari macchie opache sulla cornea dovute ad accumulo di calcio durante il trattamento;
- Il prodotto è utilizzabile soltanto da una persona;
- Il prodotto è soltanto per uso oftalmico;
- Non utilizzare il prodotto se il monodose, al momento della prima apertura, risultasse danneggiato o non perfettamente chiuso;
- Non utilizzare il prodotto se ci sono particelle visibili e/o cambiamenti nel colore della soluzione;
- Durante l'applicazione, non toccare l'occhio e nessun'altra superficie con la punta del monodose;
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione e/o piante Asteraceae e/o piante Malvacee;
- Il prodotto non è adatto nei bambini;
- Non sono riportate interazioni con farmaci o altre gocce oculari; in ogni caso, lasciare trascorrere almeno 15 minuti prima di somministrare qualsiasi altra goccia oculare;
- In caso di problemi durante il trattamento, interromperne l'uso e consultare un medico;
- Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza riportata sulla confezione e sul monodose;
- Smaltire il prodotto in base alle normative locali sulla gestione dei rifiuti;
- Tenere fuori dalla portata dei bambini;
- Consultare il medico prima dell'utilizzo in casi di gravidanza o allattamento;
- Per uso esterno, non ingerire;
- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'Autorità Competente dello Stato membro in cui si è stabiliti.

EFFETTI INDESIDERATI

Subito dopo l'applicazione, si potrebbe verificare un blando offuscamento della vista che scompare rapidamente. Si consiglia quindi di attendere qualche secondo prima di effettuare qualsiasi attività che richieda una visione chiara.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare fra 2°C e 30°C in luogo asciutto lontano da fonti di calore e dall'esposizione diretta alla luce solare.

Il contenuto del monodose può essere utilizzato entro 12 ore dalla prima apertura.

CONFEZIONAMENTO

Da 5 a 30 monodose richiudibili da 0.5 ml.

VALIDITÀ

A confezione chiusa, non superare la data di scadenza riportata sulla confezione e sul monodose.



DT/01/DT/004



C.O.C. Farmaceutici S.r.l.

Via Modena, 15 - 40019

Sant'Agata Bolognese (BO) Italia

Ultima Revisione: 02.01 del 10/2022



C.O.C. Farmaceutici srl

Via Modena, 15
40019 - S. Agata Bolognese (BO) ITALIA
Via Chiesa Sud, 156 C/D/E/F/G
41016 - Rovereto s/S - Novi di Modena (MO) ITALIA

Cap. Soc. € 1.200.000 I.V.
C.F. e Iscr. Reg.
Impr. di Bologna 03541870378
P.IVA IT 01603491208
R.E.A. Bologna N. 299432



Tubilux Pharma S.p.A.

Via Costarica, 20/22
00071 Pomezia (Roma)
ITALIA

cap. soc. € 472.500,00 I.V.
C.F. / P.IVA 05406661008
R.E.A. Roma N. 883476