

HYALUMILLA ADVANCED

"HYALUMILLA ADVANCED" è una soluzione sterile per uso oftalmico a pH fisiologico contenente acido ialuronico (come sodio ialuronato) di grado farmaceutico, un polimero normalmente presente in diversi distretti del corpo umano. L'acido ialuronico ha proprietà viscoelastiche, muco-mimetiche e mucoadesive che migliorano la stabilità del film lacrimale e mantengono la superficie oculare lubrificata e idratata.

Non contiene conservanti e/o molecole ad azione anti-infiammatoria o vaso-costrittrice.

"HYALUMILLA ADVANCED" è compatibile con lenti a contatto morbide e rigide.

INDICAZIONI D'USO

"HYALUMILLA ADVANCED" idrata e lubrifica l'occhio e pertanto dona sollievo agli occhi in caso di irritazione, secchezza e sensazione di corpo estraneo causati da:

- - sindrome dell'occhio secco;
- - fattori meccanici (uso di lenti a contatto, dopo chirurgia oculare);
- - fattori ambientali (vento, fumo, polline, polvere, inquinamento);
- - stress visivo (eccessiva luce, uso prolungato di computer, pc, tablet).

COMPOSIZIONE

Sodio Ialuronato 0.2%, Acido Citrico Monoidrato, Sodio Citrato Trisodico Biidrato, Sodio Cloruro, Acqua per preparazioni iniettabili.

ISTRUZIONI D'USO

- Lavare accuratamente le mani;
- Prima della somministrazione rimuovere il sigillo di garanzia;
- Rimuovere il tappo;
- Reclinare la testa e guardare in alto;
- Abbassare delicatamente la palpebra inferiore dell'occhio in modo da formare una piccola tasca tra la palpebra e l'occhio;
- Prendere il flacone con l'altra mano, capovolgerlo ed esercitare una pressione moderata sul flacone in modo da erogare 1 goccia di "HYALUMILLA ADVANCED" all'interno della tasca creata;

- Dopo aver erogato la prima goccia aspettare qualche secondo prima di schiacciare nuovamente la bottiglia. Questo permetterà all'aria di ritornare nel sistema facilitando l'erogazione della goccia successiva;
- In ragione delle caratteristiche intrinseche del flacone con erogatore per soluzioni senza conservanti, al progressivo svuotamento del flacone potrebbe essere necessario esercitare una pressione maggiore per consentire la fuoriuscita del prodotto. Una piccola quantità di soluzione rimane sempre all'interno del flacone;
- Se si ritiene di aver mancato l'occhio, somministrare un'altra goccia;
- Ripetere il procedimento per l'altro occhio, se necessario;
- Dopo l'uso agitare il flacone per rimuovere l'eventuale prodotto in eccesso prima di riposizionare il tappo sul contenitore;
- Dopo l'uso richiudere immediatamente il flacone con il tappo;
- Se, dopo l'uso, il flacone risultasse schiacciato, attendere che ritorni nella forma originale prima di chiuderlo con l'apposito tappo;
- Non toccare la punta dell'applicatore, nemmeno con gli occhi o le dita;
- "HYALUMILLA ADVANCED" può essere utilizzato in base alla necessità oppure in accordo alle indicazioni del medico;
- Dopo la prima apertura, il contenuto del flacone può essere riutilizzato entro 3 mesi.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto è solo per uso oftalmico;
- Il prodotto è monopaziente;
- Non utilizzare il prodotto se il sigillo di garanzia del tappo non è integro al momento del primo utilizzo;
- Non utilizzare il prodotto se ci sono particelle visibili e/o cambiamenti nel colore della soluzione;
- Non toccare altre superfici, incluso l'occhio, con l'estremità di erogazione;
- Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza riportata sulla confezione e sul flacone;
- In caso di effetti indesiderati, interrompere il trattamento e consultare un medico;
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione;
- Non sono riportate interazioni con farmaci o altre gocce oculari; in ogni caso, lasciare trascorrere almeno 15 minuti prima di somministrare qualsiasi altra goccia oculare;
- Il prodotto è normalmente destinato ad un uso continuativo per non più di 30 giorni; se i sintomi persistono consultare il medico;
- Smaltire il prodotto in base alle normative locali sulla gestione dei rifiuti;
- Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini;
- Per uso esterno, non ingerire;
- Non cercare di svitare o manomettere l'erogatore del flacone;
- "HYALUMILLA ADVANCED" non è indicato per il trattamento di infezioni e altre patologie oculari. Tali condizioni richiedono l'intervento del medico;
- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'Autorità Competente dello Stato membro in cui si è stabiliti.

EFFETTI INDESIDERATI

Dopo la somministrazione, a causa della viscosità della soluzione, può verificarsi una visione leggermente offuscata che scompare rapidamente. Si consiglia quindi di attendere qualche secondo prima di effettuare qualsiasi attività che richieda una visione chiara.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare fra 2 °C e 30 °C.

Il contenuto può essere riutilizzato entro 3 mesi dalla prima apertura.

CONFEZIONAMENTO

La confezione è composta da un flacone polidose contenente 10 mL di prodotto sterile privo di conservanti.

VALIDITÀ

A confezione integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione e sull'etichetta flacone.



DT/01/DT/006



C.O.C. Farmaceutici S.r.l.

Via Modena, 15 - 40019

Sant'Agata Bolognese (BO) Italia

Ultima Revisione: 02.01 del 10/2022



C.O.C. Farmaceutici srl
Via Modena, 15
40019 - S. Agata Bolognese (BO) ITALIA
Via Chiesa Sud, 156 C/D/E/F/G
41016 - Rovereto s/S - Novi di Modena (MO) ITALIA

Cap. Soc. € 1.200.000 I.V.
C.F. e Iscr. Reg.
Impr. di Bologna 03541870378
P.IVA IT 01603491208
R.E.A. Bologna N. 299432



Tubilux Pharma S.p.A.
Via Costarica, 20/22
00071 Pomezia (Roma)
ITALIA

cap. soc. € 472.500,00 I.V.
C.F. / P.IVA 05406661008
R.E.A. Roma N. 883476