

# HYALUMILLA ADVANCED

"HYALUMILLA ADVANCED" è una soluzione sterile per uso oftalmico a pH fisiologico contenente acido ialuronico (come sodio ialuronato) di grado farmaceutico, un polimero normalmente presente in diversi distretti del corpo umano. L'acido ialuronico ha proprietà viscoelastiche, muco-mimetiche e mucoadesive che migliorano la stabilità del film lacrimale e mantengono la superficie oculare lubrificata e idratata.

La soluzione è compatibile con lenti a contatto morbide e rigide.

Non contiene conservanti e/o molecole ad azione anti-infiammatoria o vaso-costrittrice.

"HYALUMILLA ADVANCED" è compatibile con lenti a contatto morbide e rigide.

## INDICAZIONI D'USO

"HYALUMILLA ADVANCED" idrata e lubrifica l'occhio e pertanto dona sollievo agli occhi in caso di irritazione, secchezza e sensazione di corpo estraneo causati da:

- sindrome dell'occhio secco;
- fattori meccanici (uso di lenti a contatto, dopo chirurgia oculare);
- fattori ambientali (vento, fumo, polline, polvere, inquinamento);
- stress visivo (eccessiva luce, uso prolungato di computer, pc, tablet).

## COMPOSIZIONE

Sodio Ialuronato 0.2%, Acido Citrico Monoidrato, Sodio Citrato Trisodico Biidrato, Sodio Cloruro, Acqua per preparazioni iniettabili.

## ISTRUZIONI D'USO

- Lavare accuratamente le mani.
- Aprire la busta di alluminio.
- Staccare il monodose dallo strip e aprirlo ruotando e poi sollevando il tappo di chiusura.
- Reclinare la testa e guardare in alto.
- Abbassare delicatamente la palpebra inferiore dell'occhio in modo da formare una piccola tasca tra la palpebra e l'occhio.
- Tenere il monodose con l'altra mano, capovolgerlo ed esercitare una leggera pressione sul monodose in modo da erogare 1 goccia di "HYALUMILLA ADVANCED" all'interno della tasca creata.
- Se si ritiene di aver mancato l'occhio, somministrare un'altra goccia.
- Ripetere il procedimento per l'altro occhio, se necessario.

- Dopo l'utilizzo richiudere immediatamente il monodose con l'apposito tappo: il contenuto può essere riutilizzato entro 24 ore dalla prima apertura. Per richiudere il monodose occorre prima capovolgere il tappo.
- Il prodotto può essere utilizzato in base alla necessità oppure in accordo alle indicazioni del medico.

## AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto è monopaziente;
- Il prodotto è solo per uso oftalmico;
- Non utilizzare il prodotto se la busta di alluminio o il monodose risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso;
- Non utilizzare il prodotto se ci sono particelle visibili e/o cambiamenti nel colore della soluzione;
- Durante l'applicazione, non toccare l'occhio e nessun'altra superficie con la punta del monodose;
- In caso di effetti indesiderati, interrompere il trattamento e consultare un medico;
- Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza riportata sulla confezione e sul monodose;
- Non utilizzare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione;
- Non sono riportate interazioni con farmaci o altre gocce oculari; in ogni caso, lasciare trascorrere almeno 15 minuti prima di somministrare qualsiasi altra goccia oculare;
- Smaltire il prodotto in base alle normative locali sulla gestione dei rifiuti;
- Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini;
- Il prodotto è normalmente destinato ad un uso continuativo per non più di 30 giorni; se i sintomi persistono consultare il medico;
- Consultare il medico prima dell'utilizzo in casi di gravidanza o allattamento;
- Per uso esterno, non ingerire;
- "HYALUMILLA ADVANCED" non è indicato per il trattamento di infezioni e altre patologie oculari. Tali condizioni richiedono l'intervento del medico.
- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'Autorità Competente dello Stato membro in cui si è stabiliti.

## EFFETTI INDESIDERATI

Dopo la somministrazione, a causa della viscosità della soluzione, può verificarsi una visione leggermente offuscata che scompare rapidamente. Si consiglia quindi di attendere qualche secondo prima di effettuare qualsiasi attività che richieda una visione chiara.

## CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare fra 2 °C e 30 °C.

Il contenuto del monodose deve essere utilizzato entro 24 ore dalla prima apertura.

Conservare gli altri flaconcini monodose nella confezione originale in alluminio fino al momento dell'uso.

## CONFEZIONAMENTO

Da 5 a 30 monodose richiudibili contenenti 0.5 ml di soluzione oculare.

## VALIDITÀ

A confezionamento integro, non superare la data di scadenza riportata sulla confezione e sul monodose.



DT/01/DT/006



**C.O.C. Farmaceutici S.r.l.**

Via Modena, 15 - 40019

Sant'Agata Bolognese (BO) Italia

Ultima Revisione: 02.01 del 10/2022



**C.O.C. Farmaceutici srl**  
Via Modena, 15  
40019 - S. Agata Bolognese (BO) ITALIA  
Via Chiesa Sud, 156 C/D/E/F/G  
41016 - Rovereto s/S - Novi di Modena (MO) ITALIA

Cap. Soc. € 1.200.000 I.V.  
C.F. e Iscr. Reg.  
Impr. di Bologna 03541870378  
P.IVA IT 01603491208  
R.E.A. Bologna N. 299432



**Tubilux Pharma S.p.A.**  
Via Costarica, 20/22  
00071 Pomezia (Roma)  
ITALIA

cap. soc. € 472.500,00 I.V.  
C.F. / P.IVA 05406661008  
R.E.A. Roma N. 883476