

OFTA GREEN

OFTA GREEN è una soluzione salina sterile, oftalmica, con pH fisiologico.

La soluzione salina formata da sodio cloruro e acqua per preparazioni iniettabili dona sollievo in caso di secchezza e irritazione oculare.

La formulazione contiene anche acque distillate di Camomilla, Amamelide ed Eufrasia che assicurano un'azione idratante.

Non contiene conservanti e/o molecole con azioni antinfiammatorie e vaso-costrittive.

OFTA GREEN è compatibile con lenti a contatto.

INDICAZIONI D'USO

OFTA GREEN viene utilizzato per la sua azione rinfrescante e lenitiva.

OFTA GREEN è indicato per il sollievo dell'occhio secco e irritato a causa di:

- Agenti atmosferici e fattori ambientali (aria condizionata, radiazione solare eccessiva, vento, fumo, inquinamento, sale, acqua di mare, acqua della piscina);
- Eccessivo affaticamento dovuto a lunghe ore di lavoro al computer, studio;
- Lieve sindrome da occhio secco;
- Utilizzo per molte ore al giorno di lenti a contatto.

COMPOSIZIONE

Sodio Cloruro (0,85%), Acqua Distillata Di Camomilla, Acqua Distillata Di Amamelide, Acqua Distillata Di Eufrasia, Sodio Fosfato Monobasico Monoidrato, Sodio Fosfato Dibasico Diidrato, Acqua Per Preparazioni Iniettabili.

ISTRUZIONI D'USO

- Lavare e asciugare accuratamente le mani prima dell'uso;
- Prima della prima somministrazione, rimuovere il sigillo di chiusura;
- Aprire il flacone rimuovendo il tappo di protezione;
- Capovolgere il flacone ed esercitare una lieve pressione sullo stesso per instillare 1 o 2 gocce in ciascun occhio;
- Dopo aver erogato la prima goccia aspettare qualche secondo prima di schiacciare nuovamente la bottiglia. Questo permetterà all'aria di ritornare nel sistema facilitando l'erogazione della goccia successiva;
- In ragione delle caratteristiche intrinseche del flacone con erogatore per soluzioni senza conservanti, al progressivo svuotamento del flacone potrebbe essere necessario esercitare una pressione maggiore per consentire la fuoriuscita del prodotto. Una piccola quantità di soluzione rimane sempre all'interno del flacone;

- Dopo l'uso agitare il flacone per rimuovere l'eventuale prodotto in eccesso prima di riposizionare il tappo sul contenitore;
- Dopo l'uso richiudere immediatamente il flacone con il tappo;
- Se, dopo l'uso, il flacone risultasse schiacciato, attendere che ritorni nella forma originale prima di chiuderlo con l'apposito tappo;
- Non toccare la punta dell'applicatore, nemmeno con gli occhi o le dita;
- Il contenuto può essere riutilizzato entro 3 mesi dalla prima apertura;
- È adatto per un uso frequente. Salvo diversa indicazione del medico, si può utilizzare il prodotto anche più volte al giorno (3 o 4 volte o più spesso se necessario).

Il prodotto può essere utilizzato in presenza di lenti a contatto.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Se ha un grave danno allo strato trasparente più esterno dell'occhio (la cornea), i fosfati presenti in questo prodotto possono causare in casi molto rari macchie opache sulla cornea dovute ad accumulo di calcio durante il trattamento;
- Il prodotto è solo per uso oftalmico;
- Il prodotto è per uso monopaziente;
- Non utilizzare il prodotto se il flacone risulta, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso;
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione e sull'etichetta;
- Durante l'applicazione, non toccare l'occhio né altre superfici con l'estremità di erogazione;
- Non utilizzare il prodotto in caso di incompatibilità nota verso qualsiasi componente della preparazione;
- In caso di effetti indesiderati durante il trattamento interrompere l'uso e consultare un medico;
- Non utilizzare il prodotto in caso di incompatibilità nota verso qualsiasi componente della preparazione e/o piante Asteraceae e/o piante Compositae e/o piante Hamamelidaceae e/o piante Orobanchaceae;
- Non sono riportate interazioni con farmaci o altre gocce oculari; in ogni caso, lasciare trascorrere almeno 15 minuti prima di somministrare qualsiasi altra goccia oculare;
- Smaltire il prodotto in base alle normative locali sulla gestione dei rifiuti;
- Tenere fuori dalla portata dei bambini;
- Consultare il medico prima dell'utilizzo in casi di gravidanza o allattamento;
- Non tentare di manomettere o smontare l'ugello dalla bottiglia;
- Per uso esterno, non ingerire;
- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'Autorità Competente dello Stato membro in cui si è stabiliti.

EFFETTI INDESIDERATI

Ad oggi non è noto alcun effetto indesiderato.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare tra 2°C e 25°C in un luogo asciutto, lontano dal calore e dall'esposizione diretta alla luce solare.

Il contenuto può essere utilizzato entro 3 mesi dalla prima apertura.

CONFEZIONAMENTO

Un flacone da 10 ml di soluzione sterile senza conservanti.

VALIDITÀ

A confezionamento integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione e sull'etichetta del flacone.



DT/01/DT/011



C.O.C. Farmaceutici S.r.l.

Via Modena, 15 - 40019

Sant'Agata Bolognese (BO) Italia

Indirizzo del Distributore:

Ultima Revisione: 03.01 del 05/2023



C.O.C. Farmaceutici srl

Via Modena, 15
40019 - S. Agata Bolognese (BO) ITALIA
Via Chiesa Sud, 156 C/D/E/F/G
41016 - Rovereto s/S - Novi di Modena (MO) ITALIA

Cap. Soc. € 1200.000 I.V.
C.F. e Iscr. Reg.
Impr. di Bologna 03541870378
P.IVA IT 01603491208
R.E.A. Bologna N. 299432



Tubilux Pharma S.p.A.

Via Costarica, 20/22
00071 Pomezia (Roma)
ITALIA

cap. soc. € 472.500,00 I.V.
C.F. / P.IVA 05406661008
R.E.A. Roma N. 883476