

SWEETCLEAN SPRAY ADULTS

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO

INTRODUZIONE

Sweetclean spray adults è uno spray nasale ipertonico senza conservanti a base di sali marini delle acque della Corrente del Golfo, acido ialuronico reticolato con urea e glicerina.

DESCRIZIONE

Sweetclean spray adults è una soluzione salina sterile, ipertonica, a pH fisiologico, priva di conservanti, la cui formulazione è in grado di determinare un'azione idratante e protettiva della mucosa nasale prevenendone la secchezza e favorendo la fluidificazione e l'eliminazione delle secrezioni nasali.

Sweetclean spray adults agisce tramite un processo completamente naturale, l'osmosi salina, che promuove l'eliminazione dell'acqua in eccesso presente nella mucosa nasale irritata, inoltre fluidifica e diluisce il muco presente nella cavità nasale.

I Sali marini delle acque della Corrente del Golfo contribuiscono a pulire le fosse nasali agevolando il distacco del muco e riducendo i fenomeni irritativi a carico delle mucose.

L'Acido ialuronico reticolato favorisce l'umidificazione delle cavità nasali e rende più gradevole la soluzione salina.

La presenza di Glicerina vegetale coadiuva il ripristino del giusto livello di idratazione della mucosa.

Sweetclean spray adults non contiene conservanti e/o sostanze con attività vasocostrittrice.

Sweetclean spray adults non contiene gas propellenti.

INDICAZIONI D'USO

Sweetclean spray adults è indicato per un immediato sollievo del naso in caso di comuni raffreddori, riniti, sinusiti e in generale per tutte le situazioni che comportano congestione nasale o irritazione.

Utile in caso di secchezza della mucosa nasale, in quanto ne favorisce l'idratazione, svolgendo un effetto lenitivo anche in presenza di irritazioni.


ISTRUZIONI PER L'USO

1. Soffiare il naso prima dell'applicazione;
2. Rimuovere il cappuccio di protezione (fig. 1);
3. Tenere il flacone con le tre dita di una mano (fig. 2):
 - l'indice e il medio sono posizionati sopra l'erogatore e trattengono la pompa nebulizzatrice mentre il pollice sostiene il fondo del flacone;
4. Al primo utilizzo, premere l'erogatore fino ad ottenimento di uno spruzzo regolare ed uniforme;
5. Introdurre la punta dell'erogatore nella narice e spruzzare mantenendo la testa dritta ed il flacone in posizione verticale con il pollice sul fondo e due dita sull'erogatore (fig. 3);
6. Ripetere l'operazione nell'altra narice;
7. Lasciare agire il prodotto per alcuni minuti, poi, se necessario, soffiarsi il naso;
8. Dopo l'uso, lavare l'erogatore con acqua, asciugare e riposizionare il cappuccio di protezione (fig. 4).

Utilizzare due volte al giorno, o secondo il parere del medico.

Dopo la prima apertura, il contenuto del flacone può essere riutilizzato entro 3 mesi.

L'utilizzo del flacone è strettamente personale.

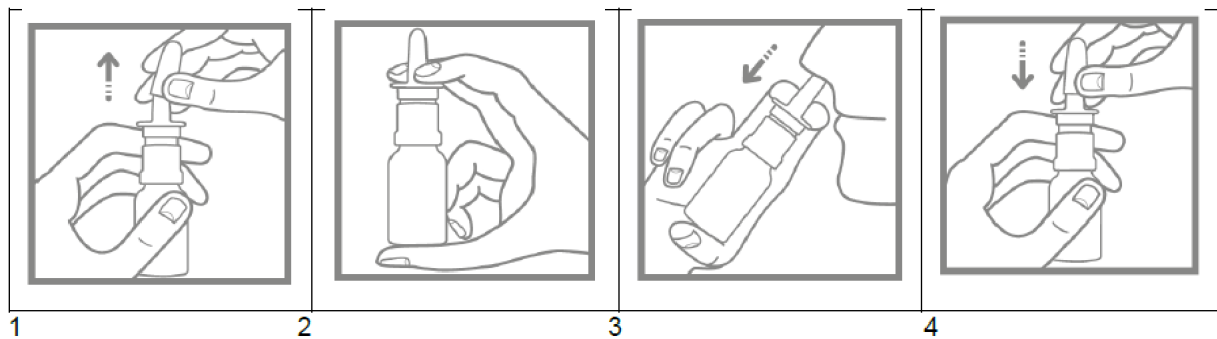

COMPOSIZIONE

Sali marini delle acque della Corrente del Golfo, Glicerina vegetale, Sodio ialuronato reticolato in soluzione acquosa, Sodio citrato, Acido citrico, Acqua per preparazioni iniettabili.

CONFEZIONE

La confezione è composta da 1 flacone dal contenuto sterile, in plastica, con erogatore spray, senza conservanti.

AVVERTENZE

Esclusivamente per uso nasale

Il contenuto del flacone spray è utilizzabile da una sola persona.

Non utilizzare il prodotto se il flacone non è perfettamente chiuso e/o integro.

Non manomettere o danneggiare il flacone ed i suoi meccanismi.

Non usare il prodotto in caso di nota incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione.

In caso di reazioni indesiderate durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.

La somministrazione di farmaci per uso inalatorio in contemporanea con lo spray nasale deve essere svolta sotto controllo del medico che ne può valutare le possibili interazioni.

Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Non ingerire.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, e dall'esposizione diretta ai raggi solari, ad una temperatura compresa tra 2°C e 30°C.

VALIDITÀ

A confezione integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione e sull'etichetta flacone.



C.O.C. Farmaceutici S.r.l.
Via Modena, 15 - 40019
Sant'Agata Bolognese (BO)
Italia



STERILE A

Data di ultima revisione: 02.01 del 02/2020



C.O.C. Farmaceutici srl
Via Modena, 15
40019 - S. Agata Bolognese (BO) ITALIA
Via Chiesa Sud, 156 C/D/E/F/G
41016 - Rovereto s/S - Novi di Modena (MO) ITALIA

Cap. Soc. € 1.200.000 I.V.
C.F. e Iscr. Reg.
Impr. di Bologna 03541870378
P.IVA IT 01603491208
R.E.A. Bologna N. 299432



Tubilux Pharma S.p.A.
Via Costarica, 20/22
00071 Pomezia (Roma)
ITALIA

cap. soc. € 472.500,00 I.V.
C.F. / P.IVA 05406661008
R.E.A. Roma N. 883476