

SWEETCLEAN SPRAY BABY

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO

INTRODUZIONE

Sweetclean spray baby è uno spray nasale isotonico senza conservanti a base di sali marini delle acque della Corrente del Golfo, acqua distillata di camomilla e aloe vera gel.

DESCRIZIONE

Sweetclean spray baby è una soluzione salina sterile, isotonica, a pH fisiologico, priva di conservanti, la cui formulazione è in grado di determinare un'azione idratante e protettiva della mucosa nasale favorendo la fluidificazione e l'eliminazione delle secrezioni nasali.

I Sali marini delle acque della Corrente del Golfo contribuiscono a pulire le fosse nasali agevolando il distacco del muco e riducendo i fenomeni irritativi a carico delle mucose.

L'Aloe vera gel, nota per la sua azione protettiva e idratante, crea un film ad effetto barriera che protegge la mucosa nasale.

La presenza di Acqua di distillata di Camomilla coadiuva l'attività emolliente dell'Aloe.

Sweetclean spray baby non contiene conservanti e/o sostanze con attività vasocostrittrice.

Sweetclean spray baby non contiene gas propellenti.

INDICAZIONI D'USO

Sweetclean spray baby è indicato per la detersione nasale quotidiana di adulti e bambini (a partire dai 6 mesi) consentendo di liberare il naso, anche in presenza di raffreddore, e di migliorare la respirazione.

Utile in caso di secchezza della mucosa nasale, in quanto ne favorisce l'idratazione, svolgendo un effetto lenitivo anche in presenza di irritazioni.

ISTRUZIONI D'USO


1. Rimuovere il cappuccio di protezione (fig. 1);
2. Tenere il flacone con le tre dita di una mano (fig. 2):
 - l'indice e il medio sono posizionati sopra l'erogatore e trattengono la pompa nebulizzatrice mentre il pollice sostiene il fondo del flacone;
3. Al primo utilizzo, premere l'erogatore fino ad ottenimento di uno spruzzo regolare ed uniforme;
4. Introdurre la punta dell'erogatore nella narice e spruzzare mantenendo la testa dritta ed il flacone in posizione verticale con il pollice sul fondo e due dita sull'erogatore (fig. 3);

5. Ripetere l'operazione nell'altra narice;
6. Lasciare agire il prodotto per alcuni minuti, poi, se necessario, soffiarsi il naso o rimuovere l'eccesso di muco;
7. Dopo l'uso, lavare l'erogatore con acqua, asciugare e riposizionare il cappuccio di protezione (fig. 4).

Utilizzare due volte al giorno, o secondo il parere del medico.

Dopo la prima apertura, il contenuto del flacone può essere riutilizzato entro 3 mesi.

L'utilizzo del flacone è strettamente personale.

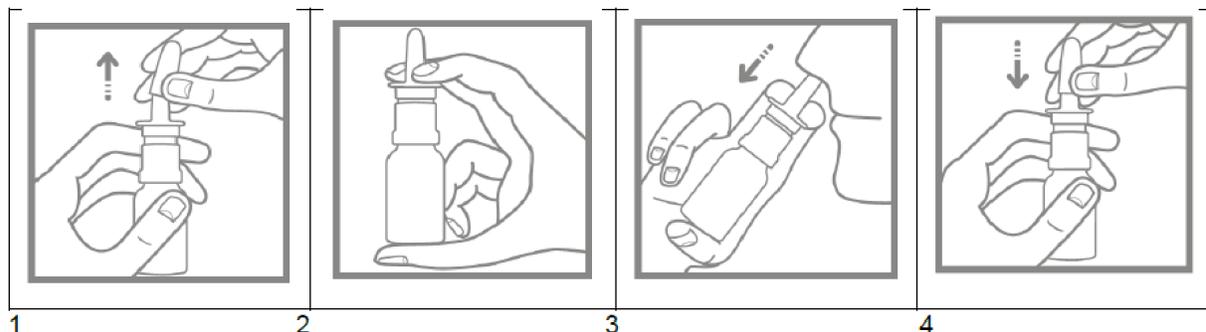

COMPOSIZIONE

Sali marini delle acque della Corrente del Golfo, Aloe vera gel, Acqua distillata di Camomilla, Sodio citrato, Acido citrico, Acqua per preparazioni iniettabili.

CONFEZIONE

La confezione è composta da 1 flacone dal contenuto sterile, in plastica, con erogatore spray, senza conservanti.

AVVERTENZE

Esclusivamente per uso nasale

Il contenuto del flacone spray è utilizzabile da una sola persona.

Non utilizzare il prodotto se il flacone non è perfettamente chiuso e/o integro.

Non manomettere o danneggiare il flacone ed i suoi meccanismi.

Non usare il prodotto in caso di nota incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione.

In caso di reazioni indesiderate durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.

La somministrazione di farmaci per uso inalatorio in contemporanea con lo spray nasale deve essere svolta sotto controllo del medico che ne può valutare le possibili interazioni.

Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Non ingerire.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, e dall'esposizione diretta ai raggi solari, ad una temperatura compresa tra 2°C e 30°C.

VALIDITÀ

A confezione integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione e sull'etichetta flacone.



C.O.C. Farmaceutici S.r.l.
Via Modena, 15 - 40019
Sant'Agata Bolognese (BO)
Italia



STERILE A

Data di ultima revisione: 02.01 del 02/2020



C.O.C. Farmaceutici srl
Via Modena, 15
40019 - S. Agata Bolognese (BO) ITALIA
Via Chiesa Sud, 156 C/D/E/F/G
41016 - Rovereto s/S - Novi di Modena (MO) ITALIA

Cap. Soc. € 1.200.000 I.V.
C.F. e Iscr. Reg.
Impr. di Bologna 03541870378
P.IVA IT 01603491208
R.E.A. Bologna N. 299432



Tubilux Pharma S.p.A.
Via Costarica, 20/22
00071 Pomezia (Roma)
ITALIA

cap. soc. € 472.500,00 I.V.
C.F. / P.IVA 05406661008
R.E.A. Roma N. 883476